



Clean

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Faixa/cinturão lombar/abdominal com a parte das costas em duplo tecido resistente, barbatanas de ABS, parte frontal em fitas de elástico para ajuste, fechamento em velcro, suspensório em (X) com fivelas de ajuste e acabamento em viés.

CARACTERÍSTICAS

- Elástico de alta densidade;
- Hastes para sustentação;
- Faixa elástica para compressão extra;
- Auxilia na correção da postura;



REFERÊNCIA	97.01.2.1	97.01.2.2	97.01.2.3	97.01.2.4
TAMANHO	P	M	G	GG
LARGURA	85 - 96	96 - 107	107 - 120	120 - 133
COMPRIMENTO	96	107	120	135
EMBALAGEM	1 (sku)		Mult. 10 Master 60	

SEGMENTOS



Indústria

NORMAS

A cinta ergonômica não é considerado um Equipamento de Proteção Individual – EPI, portanto, é isento de certificado de aprovação (C.A).

RECOMENDAÇÕES

Este produto ajuda a conservar a saúde do trabalhador e aumenta seu rendimento ao melhorar o método de trabalho e sua postura. O usuário que apresentar dores ou problemas de coluna não deve utilizar a faixa sem orientação médica.

APLICAÇÃO

A faixa elástica deve ser usada durante esforços físicos.

INSTRUÇÕES DE USO



Abra a sua cinta ergonômica e coloque os suspensórios.



Ajuste a cinta ergonômica entre o quadril e a costela.



Pegue os dois extremos da cinta ergonômica para ajuste.



Puxe e una o extremo do lado esquerdo sobre o lado direito.



Puxe e una o extremo do lado direito sobre o lado esquerdo, coincidindo com o fechamento do velcro. Ajustando a cinta a sua medida.



Ajuste os suspensórios e a tensão da cinta à sua medida.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;
Para a realização da limpeza, lavar com água fria, não usar lavadora ou secadora. Deixar secar à sombra;
Armazenar em sua embalagem original;
Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

